



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Оцініть кровотечу, розірвіть пакет і вилучіть бинт. Пакет не викидайте!
 2. Заповніть (затампонуйте) рану гемостатичним бинтом (при необхідності застосуйте декілька бинтів), залишок бинту розмістіть поверх рани для додаткового тиску.
 3. Притискайте бинт до рани упродовж 3 хвилин або до повної зупинки кровотечі.
 4. Закріпіть бинт, використовуючи поверх давячу пов'язку або звичайний бинт.
- Оцініть кровотечу. В разі поновлення кровотечі
 - використайте додаткові засоби для її зупинки.
- Підкладіть упаковку від бинта під останній шар пов'язки — це допоможе медперсоналу дізнатись який засіб був застосований.

Виробник: ТОВ "ТАКТИСПАС",
вул. Кульчицького Генерала,
буд. 23, місто Київ, 01103, Україна

ІНСТРУКЦІЯ З ВИЛУЧЕННЯ:

1. Обережно вилучити гемостатичний бинт з рани (процедура має здійснюватися тільки кваліфікованим медичним персоналом)
2. Ретельно промити рану

! Тільки для зовнішнього застосування. Упаковку розкривати безпосередньо перед використанням. Якщо пакет пошкоджений або відкритий – стерильність виробу не гарантується і його не можна застосовувати за прямим призначенням. Засіб повторному використанню не підлягає. Повторна стерилізація неможлива. Уникати контакту з очима.

Склад: хімічна гемостатична композиція на основі каоліну.

info@bloodsaver.net
www.bloodsaver.net